

LifenaXX® * Benutzerhandbuch

Wlan Otoskop LX-032

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter dem Internet-Link: www.technaxx.de/ (in der Fußleiste "Konformitätserklärung"). Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Geräts durch.

Servicetelefonnummer für technische Unterstützung: 01805 012643 (14 Cent / Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent / Minute aus dem Mobilfunknetz).

Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, um später darauf Bezug nehmen zu können. Tun Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

2 Jahre Garantie

Dieses Produkt ist für die Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt. Das Produkt darf nur zur Reinigung und Kontrolle des Gehörgangs oder der Nasenhöhle eingesetzt werden. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass Sie nicht zu tief in die Öffnungen eindringen, Sie könnten Schäden verursachen.

Merkmale

- CMOS-Kamera 3MP.
- Auflösung 1920 x 1080P 30FPS.
- 6-Achsen-Gyroskop
- Fokusabstand 1,5-2cm
- Batterietiefstandsanzeige

Technische Daten

USB (nur in trockenem Zustand laden)	5V max. 0,2A
Akku	3,7V / 250mAh
Kamera	3MP 1920x1080 30FPS
Betriebszeit	60 Minuten
Ladezeit	90 Minuten
WLAN	Übertragungsbereichweite ~8m (im Freien); Frequenzband 2,4GHz; Abgestrahlte Sendeleistung max. 20mW
LED	6
Durchmesser der Linse	3,9mm
Abmessungen	Ø1,3x 14cm
Gewicht	17g

Erster Gebrauch

- Laden Sie das Gerät vollständig mit dem USB-Kabel, dies kann bis zu 90 Minuten

dauern. ● Öffnen Sie den APP-Store und suchen Sie nach der App iTiMO.
● Installieren Sie die App auf Ihrem Gerät und öffnen Sie die App.

● Starten Sie das Otoskop. ● Drücken Sie das Symbol  in der APP. ● Ein neues Fenster mit allen verfügbaren Wlan-Verbindungen öffnet sich (Android). Bei iOS-Geräten gehen Sie bitte zu Einstellungen, Wi-Fi. ● Wählen Sie das Gerät iTiMO-xxxx, Sie erhalten möglicherweise eine Warnung, dass in diesem Netzwerk kein Internetdienst verfügbar ist. ● Gehen Sie dann zurück zur App iTiMO und

drücken Sie erneut die Taste . Sie sehen nun das Live-Video der Otoskop-Kamera. ● Bringen Sie den Reinigungslöffel Ihrer Wahl an und beginnen Sie vorsichtig mit der Reinigung. ● Wir empfehlen, das Telefon/Tablet in einer Halterung zu montieren.

APP

	Einfrieren des aktuellen Bildes
	Starten des Live-Videos
	Bild aufnehmen
	Starten oder Stoppen der Videoaufnahme
	Öffnen der Galerie, hier finden Sie die aufgenommenen Fotos und Videos.
	Einen Schritt zurück
	Einstellungen
	Wechsel von rechts nach links, dreht das Bild

Normaler Gebrauch

- Das Otoskop sollte nur in den Gehörgang eingeführt werden, wenn ein Löffel montiert ist.
- Setzen Sie den Löffel so auf das Otoskop, dass der Löffel fest sitzt.
- Seien Sie vorsichtig. Gehörgang und Nase sind empfindlich.

Reinigung

Vor und nach der Verwendung sollten Sie die Kamera reinigen.


Sicherheitshinweise

→ Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken. → Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten oder einem kompatiblen USB-Kabel auf. → Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und / oder mangelnder

Sachkenntnis bestimmt. → Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. → Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. → Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den korrekten Betrieb des Geräts! → Nicht verwenden, wenn das Gerät sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist. → Verwenden Sie das Gerät nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. in sauerstoffgesättigten oder anästhesiegefährdeten Umgebungen). → Dieses Produkt darf nicht in Bereiche mit starken Magnetfeldern, z. B. MRT-Scanner, gelangen oder dort verwendet werden. → Modifizieren Sie das Gerät nicht. → Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt aufladen.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Verwendung nur für Erwachsene. Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart entzündlicher Narkosegasgemischungen mit Luft, Sauerstoff oder Stickoxid oder nahe entflammbarer Substanzen, Gasen und Dämpfen. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizöffnungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung. Halten Sie das Gerät trocken. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.

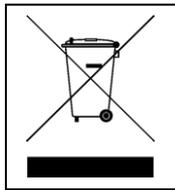

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden. Entsorgen Sie keine alten Geräte oder Batterien in den Hausmüll. **Reinigung:** Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung und Verunreinigung (verwenden Sie einen sauberen Stoff). Verwenden Sie keine rauen, grobkörnigen Materialien oder Lösungsmittel / aggressive Reiniger. Wischen Sie das gereinigte Gerät gut ab. **Vertriebs Händler:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland